

# BiLumix

## Shadowless HeadLamp

### BL-HL3S ヘッドライト「携帯バッテリー・スポット光」

#### 取扱説明書

#### 各部の名称



#### 使用方法

##### 1. 装着の前に

- ヘッドライトの電源ケーブル⑨を USB-C ケーブルと接続します。  
さらに USB-C ケーブルを携帯バッテリー⑩と接続します。  
携帯バッテリー⑩をベルトや手術着などに固定してください。
- ヘッドライトのヘッドバンド⑥は、収縮した状態で収納ケースに収められています。  
装着するには、ヘッドバンド⑥を伸長させてから行う必要があります。左手でフロントボディ③を持ち、右手の親指と人差し指でヘッドライト上部両側にあるバンドサイズ調節ボタン⑤を内側に押し込みながらリアボディ⑦を後方に引いて、ヘッドバンド⑥を伸長させてください。



ヘッドライトの装着と脱着は、必ずヘッドバンド⑥を伸長させてから行ってください。

ヘッドバンド⑥が十分に伸びていないと、ジョイント部に負荷がかかり故障の原因となります。

##### 2. ヘッドライトの装着

- ヘッドバンド⑥が伸長していることを確認してください。
- ヘッドライトを頭に被せ、バンドサイズ調節ボタン⑤を、親指と人差し指で内側に押し込みながら、リアボディ⑦を前方に押しつけて頭にフィットさせます。

##### 3. ヘッドライトの脱着

- 右手の親指と人差し指で、ヘッドライト上部両側にある、バンドサイズ調節ボタン⑤を内側に押し込みながら後方に引いて、ヘッドバンド⑥を伸長させてください。

##### 4. 光学部の位置調節

- 携帯バッテリー⑩の電源スイッチ⑬を押してください。バッテリーインジケーター⑫が点灯します。
- 光学部①を下方に移動します。この状態でライトが点灯します。
- ヘッドバンド⑥が適切に頭に固定され、光学部①が顔の中心に位置し、ライトが正面を照らしているか確認してください。
- アジャストノブ②を緩め、上下二つのスポット光が作業距離で集光するよう調節します。  
その後、アジャストノブ②で固定します。
- 光量を調節するには、携帯バッテリー⑩の上部にある光量調節ダイヤル⑭を回してください。

##### 5. ライトと電源の ON/OFF

- ライトの ON/OFF : 電源が ON の時に、光学部①を上に移動するとライトは消灯し、光学部①を下げるとライトは点灯します。
- 電源の ON/OFF : 携帯バッテリー⑩の電源スイッチ⑬を押すとバッテリーインジケーター⑫は消え、電源は OFF になります。  
使用後は必ずこの状態にしてください。

## バッテリー充電方法



1. 携帯バッテリーをクレードルにセットします。
2. USB-C ケーブルでクレードルと AC アダプタを接続します。
3. 充電を開始すると赤色の LED が点灯します。
4. 充電が完了すると赤色の LED は消灯します。
5. 充電後は携帯バッテリーをクレードルから取り外してください。

## メンテナンス

### クリーニング

ヘッドライト本体や額当て、充電クレードルの外装表面を、濃度 70%のアルコールで湿らせた不織布ガーゼ等で清拭してください。



ヘッドライト本体や額当て、充電クレードルに直接アルコール等を噴霧しないでください。

光学部やヘッドライトの接合部に液体をかけないでください。

ヘッドライト本体や電気コネクター、充電クレードル、バッテリーに液体が付着しないようにしてください。

### メンテナンス

衛生上ヘッドパッドは 4~6 ヶ月ごとに交換することをお勧めします。

## 保管方法

ヘッドライトは湿気の少ない乾燥した換気の良い安全な場所に保管し、物理的な衝撃や打撃から保護してください。製品の輸送時や長期保管時には、バッテリーを本体から外してください。

## 製品仕様

重量：本体 154g

携帯バッテリー 168g

明るさ：最大約 100,000LUX (距離 25cm)

バッテリー持続時間：約 8 時間 (最大光量)

## 製品構成

ヘッドライト本体

携帯バッテリー

クレードル

AC アダプタ 20W

USB-C ケーブル

六角レンチ

収納ケース

一般医療機器

製造販売届出番号：13B3X0013800089

製造販売業者



アコードインターナショナル株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F  
TEL 03-5810-1735 FAX 03-5810-1736

[www.accord-intl.com](http://www.accord-intl.com)

製造販売業許可番号:13B3X00138

販売業者



株式会社 エムイーテクニカ

〒335-0002 埼玉県蕨市塚越 1-8-22  
TEL 048-420-9604 FAX 048-420-9606

蕨本社 / 仙台 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

[www.met Technica.co.jp](http://www.met Technica.co.jp)

製造販売業許可番号:11B2X10068

202604-01

製造業者



チョイステック(大韓民国)