

# BiLumix

## Shadowless HeadLamp

### BL-HL2S ヘッドライト「コードレス・スポット光」 取扱説明書

#### 各部の名称



#### 使用方法

##### 1. 装着の前に

ヘッドライトのヘッドバンド⑥は、収縮した状態で収納ケースに収められています。

装着するには、ヘッドバンド⑥を伸長させてから行う必要があります。左手でフロントボディを持ち、右手の親指と人差し指でヘッドライト上部両側にあるバンドサイズ調節ボタン⑤を内側に押し込みながらリアボディ⑦を後方に引いて、ヘッドバンド⑥を伸長させてください。

**!** ヘッドライトの装着と脱着は、必ずヘッドバンド⑥を伸長させてから行ってください。  
ヘッドバンド⑥が十分に伸びていないと、ジョイント部に負荷がかかり故障の原因となります。

##### 2. ヘッドライトの装着

- ヘッドバンド⑥が伸長していることを確認してください。
- ヘッドライトを頭に被せ、バンドサイズ調節ボタン⑤を、親指と人差し指で内側に押し込みながら、リアボディ⑦を前方に押しつけて頭にフィットさせます。

##### 3. ヘッドライトの脱着

- 右手の親指と人差し指で、ヘッドライト上部両側にある、バンドサイズ調節ボタン⑤を内側に押し込みながら後方に引いて、ヘッドバンド⑥を伸長させてください。

##### 4. 光学部の位置調節

- リアボディ⑦後部にあるバッテリーボックス⑩の電源スイッチ⑫を押してください。ブルーのインジケーター⑪が点灯します。
- 光学部⑬を下方に移動します。この状態でライトが点灯します。
- ヘッドバンド⑥が適切に頭に固定され、光学部⑬が顔の中心に位置し、ライトが正面を照らしているか確認してください。
- アジャストノブ⑭を緩め、上下二つのスポット光が作業距離で集光するよう調節します。  
その後、アジャストノブ⑭で固定します。
- 光量を調節するには、バッテリーボックス⑩の右側にある光量調節ダイヤル⑮を回してください。

##### 5. ライトと電源の ON/OFF

- ライトの ON/OFF：電源が ON の時に、光学部⑬を上移動するとライトは消灯し、光学部⑬を下移動するとライトは点灯します。
- 電源の ON/OFF：バッテリーボックス⑩の電源スイッチ⑫を押すとインジケーター⑪は消え、電源は OFF になります。  
使用後は必ずこの状態にしてください。

## バッテリー充電方法

### バッテリーを充電クレードルにセット



充電：赤色のインジケーターが点灯  
白色のインジケーターが点滅  
1 2 3 4



充電完了：赤色のインジケーターが消灯  
白色のインジケーターが4つ点灯

1. バッテリーを充電クレードルにセットします。
2. USB-C 充電ケーブルで充電クレードルと AC アダプタを接続します。
3. 充電を開始すると赤色の LED が点灯すると共に、4 つの白色 LED が点滅して充電状態を知らせます。
4. 充電が完了すると赤色の LED は消灯します。
5. 充電後はバッテリーをクレードルから取り外してください。

## メンテナンス

### クリーニング

ヘッドライト本体や額当て、充電クレードルの外装表面を、濃度 70%のアルコールで湿らせた不織布ガーゼ等で清拭してください。



ヘッドライト本体や額当て、充電クレードルに直接アルコール等を噴霧しないでください。

光学部やヘッドライトの接合部に液体をかけないでください。

ヘッドライト本体や電気コネクタ、充電クレードル、バッテリーに液体が付着しないようにしてください。

### メンテナンス

衛生上ヘッドパッドは 4~6 ヶ月ごとに交換することをお勧めします。

## 保管方法

ヘッドライトは湿気の少ない乾燥した換気の良い安全な場所に保管し、物理的な衝撃や打撃から保護してください。製品の輸送時や長期保管時には、バッテリーを本体から外してください。

## 製品仕様

重量：242g

明るさ：最大約 100,000LUX (距離 25cm)

バッテリー持続時間：約 3.5 時間 (最大光量)

## 製品構成

ヘッドライト本体

予備バッテリー

充電クレードル

USB-C 充電ケーブル

AC アダプタ 20W

六角レンチ

収納ケース

一般医療機器

製造販売届出番号：13B3X0013800089

製造業者

**CTK**  
CHOICE TECHNOLOGY KOREA

チョイステック(大韓民国)

製造販売業者

 **ACCORD**  
INTERNATIONAL INC.

アコードインターナショナル株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F  
TEL 03-5810-1735 FAX 03-5810-1736

[www.accord-intl.com](http://www.accord-intl.com)

製造販売業許可番号:13B3X00138

販売業者

 **M.E. Technica**

株式会社 エムイーテクニカ

〒335-0002 埼玉県蕨市塚越 1-8-22  
TEL 048-420-9604 FAX 048-420-9606

蕨本社 / 仙台 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

[www.metecnica.co.jp](http://www.metecnica.co.jp)

製造販売業許可番号:11B2X10068

202604-01