
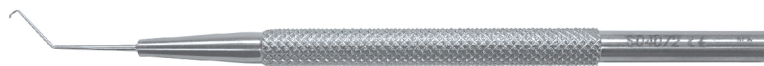


# カプセルテンションリング挿入用器具

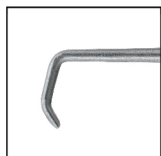


G-S04072 小堀氏CTRガイド Spiral法用

Geuder®

¥53,000

Spiral法でCTRを嚢内に挿入する際に使用します。くの字状に加工されたフックは操作性と視認性に優れCTRのコントロールやインジェクターからCTRを開放する際の操作を安定して行うことができます。

✓ 専用滅菌トレー M-2601A

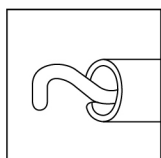

G-32960 カプセルテンションリングインジェクター 18G

Geuder®

¥148,000


インジェクターに格納されたカプセルテンションリングは滑らかに押し出され、安全に嚢内にセットすることができます。

✓ 専用滅菌トレー M-2701S


## 【Spiral法とは】

インジェクターを用いてCTRを挿入する際、CTR先端と嚢との挿入抵抗により起こる嚢の偏位とZinn小帯への負担を、フック使用により最小限に抑える方法です。


### 操作手順

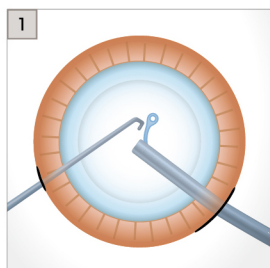

インジェクターでCTRを押し出しながらCTR先端のHOLEにフックをかけます。

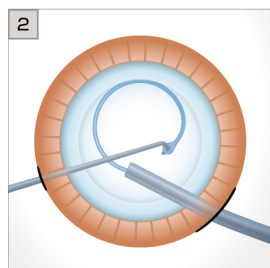

CTR先端がCCC線に沿うようにフックでコントロールしながら押し進めます。

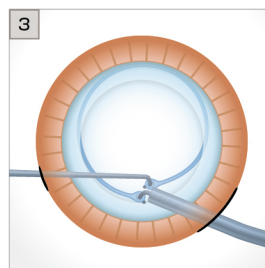

CTRの両端が重なるところまでコントロールした後、CTRを開放・固定します。

MOVIE

