



icare

tonometer

new method
no anesthetic
rapid and accurate

TA01 アイケア手持眼圧計

アイケアは、アイケアフィンランド社により開発された、 麻酔薬不要の手持眼圧計です。



TA01 アイケア手持眼圧計

- アイケア本体に測定用プローブを挿入し電源を入れると自動的に測定モードになります。面倒なキャリブレーションは不要です。
- プローブは清潔に個包装されたディスポーザブルタイプ。感染症や微生物汚染の心配がありません。角膜への接触もソフトで点眼麻酔は不要です。
- プローブの直径はわずか1.7mm。小児や眼裂の狭い患者さんの測定も容易です。

使用方法

- ① アイケア本体に測定用プローブを装填し電源を入れます。
- ② プローブ先端と角膜との距離を約6mm離れた位置でアイケアを保持します。
- ③ 測定ボタンを押すとプローブが前方に移動し角膜にソフトに接触して測定を行います。
- ④ ③の操作を6回繰り返すことで最終結果が表示されます。この間わずか3~4秒。再現性の高い測定が可能です。



定価及び製品構成

TA01 アイケア手持眼圧計 ¥640,000 (税別)

製品構成：アイケア手持眼圧計本体、ディスポーザブルプローブ 100本、
プローブベース、単3アルカリ電池 4本、取扱説明書、操作ガイド、
保証書、キャリングケース

【消耗品】 TA01-1 ディスポーザブルプローブ 100本入 ¥18,000 (税別)
TA01-2 プローブベース ¥11,000 (税別)



仕様

寸法： 13~32mm (W) × 45~80mm (H) × 230mm (L)
重量： 約250g (電池込み)
測定範囲： 7~ 50mmHg
表示範囲： 0~100mmHg (上記測定範囲外は推定参考値を表示)

電源： 単3アルカリ電池 4本
電撃に対する保護の程度： B形機器
医療機器認証番号： 21700BZY00265000
製造業者： アイケア フィンランド社 (ICARE FINLAND OY)