



icare
TONOVET
Plus

■ 操作ガイド


より詳しい情報については
取扱説明書をご覧ください



眼圧計の電源を入れ、プローブを装填します

1. セレクトボタンまたは測定ボタンを長押しし、眼圧計の電源を入れます。
測定に際しては落下防止のためにリストストラップをご使用ください。


● セレクトボタンを長押しして開始

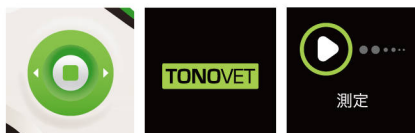

● 測定ボタンを長押しして開始




2. プローブ装填部のキャップを取り外し、プローブをセットしてください。
3. プローブを正しく装填するとディスプレイに測定開始マークが表示され、測定準備完了です。

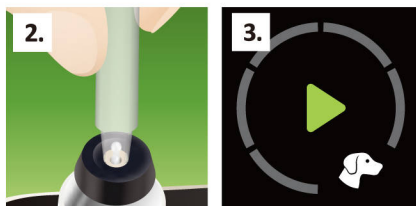

【動物種の変更方法】


動物種の設定を変更するには、メニュー画面から「設定」を選択し、ナビゲーションボタンで動物種を選択します。セレクトボタンで決定し、測定を開始します。

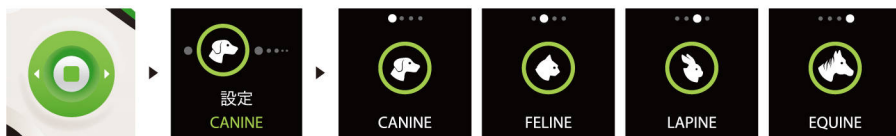

測定



ステップ 1.

対象動物をリラックスさせ、頭部はできるだけ軽く保持します。眼圧を高める可能性があるので、首や眼球に力を加えないよう気を付けてください。首輪をつけている場合は首を圧迫しないようあらかじめ外しておいてください。

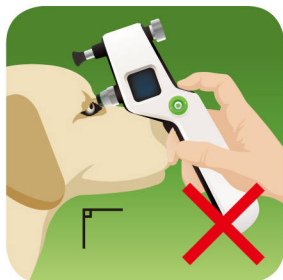

ステップ2.

プローブを水平に保ち、プローブが角膜の中心にまっすぐ向くようにします。プローブの先端から角膜表面までの距離が4～8mmになるように保持します。必要に応じて測定サポートバーを使って眼圧計を保持してください。プローブベースのインジケーターが緑色になっていることを確認してください。

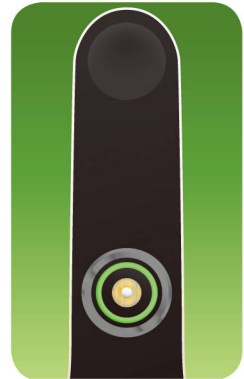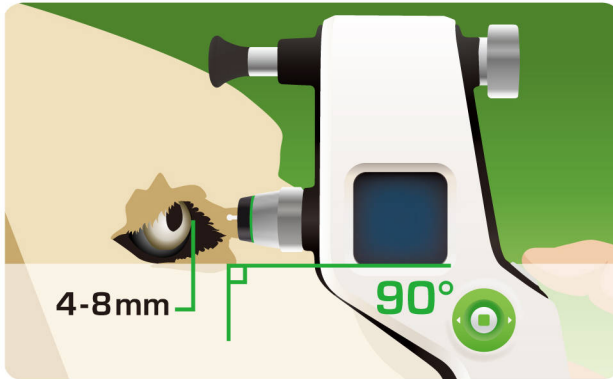

インジケーター（緑色）

ステップ3.

測定ボタンを押して、眼圧測定を開始します。

測定ボタンを押し続け、6回連続で測定を行うか、または測定ボタンを6回押して、測定を行います。測定の際にはプローブが優しく角膜に接触します。

**ビツという電子音** —


各回の測定が完了したことを示します。

ビビツという電子音 — —

測定エラーを示します。（取扱説明書のエラーメッセージをご覧ください）

ビーツという長めの電子音 ———

6回の測定がすべて終了したことを示し、測定値がディスプレイに表示されます。

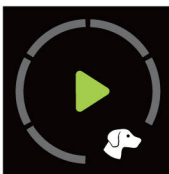測定中のディスプレイ

測定開始前



2回目の測定後



6回目の測定後

6回目の測定後
偏差がやや高い場合

再測定を推奨します


6回目の測定後
偏差が高い場合

再測定を行ってください

電源の落とし方

セレクトボタンを3秒以上押すと、眼圧計の電源がオフになります。

各部名称

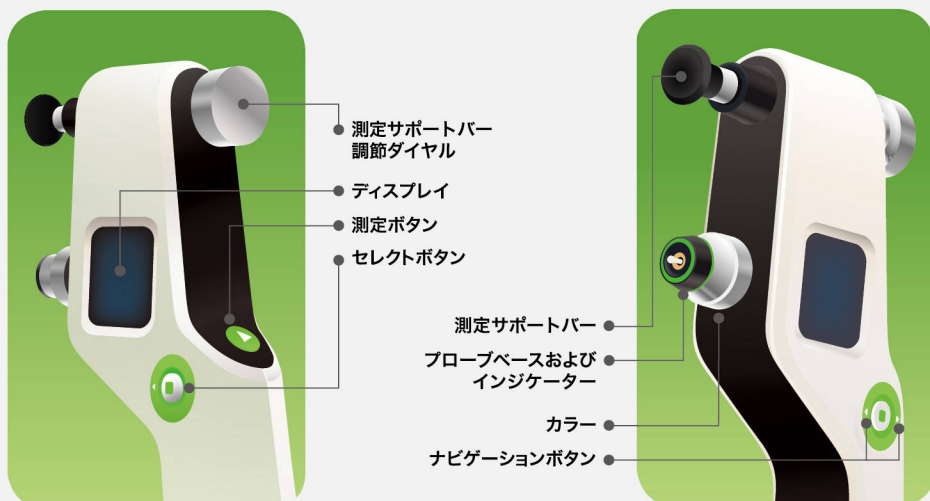

快適にご使用いただくために、フローベースを定期的に洗浄/交換してください。

フローベースの洗浄は6ヶ月ごと、交換は12ヶ月ごとが目安です。「清掃交換」エラーが表示されたら、フローベースの洗浄/交換を行ってください。フローベースは使用前に完全に乾かしてください。

フローベースの洗浄

1. 本体の電源を切ります。カラーを外し、本体を下方に向けてフローベースを眼圧計から取り外します。
2. 取り外したフローベースを逆さにして、70～100%のイソプロピルアルコールを満たした洗浄容器に沈め、5～30分ほど浸漬させます。
3. エアードスター等を吹き付け、フローベースを十分に乾燥させます。
4. 完全に乾いたフローベースを元の位置に慎重に挿入しカラーを締めます。

フローベースの洗浄/交換に関するさらに詳しい情報については取扱説明書をご覧ください。



 **M.E. Technica**
株式会社 エムイーテクニカ

〒170-0002
東京都豊島区巣鴨1-34-4
TEL 03-5395-4588

札幌 TEL 011-792-6522 大阪 TEL 06-6829-7912 福岡 TEL 092-432-3740

<http://www.met Technica.co.jp/>

製品の仕様および定価は予告なく変更することがあります。 製造販売業許可番号:28製販第11第16号