



## ■ 操作ガイド



**icare**  
**ic200**

より詳しい情報については  
取扱説明書をご覧ください 


## 操作方法

1. セレクトボタンまたは測定ボタンを長押しし、眼圧計の電源を入れます。電源を入れる方法は2通りです。(リストストラップをご使用ください)

- セレクトボタンを長押しして開始

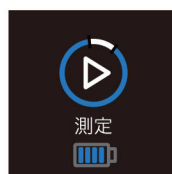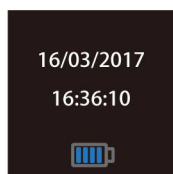


- 測定ボタンを長押しして開始

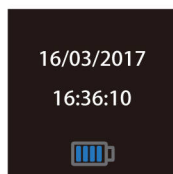

2. プローブ装填部のキャップを取り外し、右記の図が示すように、プローブを装填部に入れてください。



3. 測定マークが表示されると眼圧計は測定可能な状態になります。必要に応じてナビゲーションボタンでOD(右眼)またはOS(左眼)を選択してください。選択なしでも測定できます。

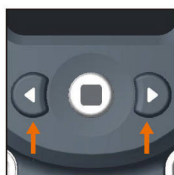

ナビゲーションボタン



右眼





選択なし



左眼

4. 額あて調節ダイヤルを回し、額あてが最大に伸びた状態であることを確認します。手持眼圧計を患者の目の前に置き、額あてを額に接触させます。額当て調節ダイヤルを回してプローブの先端から患者の眼までの距離が約5mmになるように保持します。その際誤って手持眼圧計またはプローブを患者の眼に押し入れないようにしてください。プローブベースのインジケーターが緑色になっていることを確認してください。

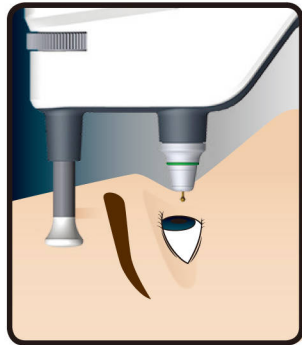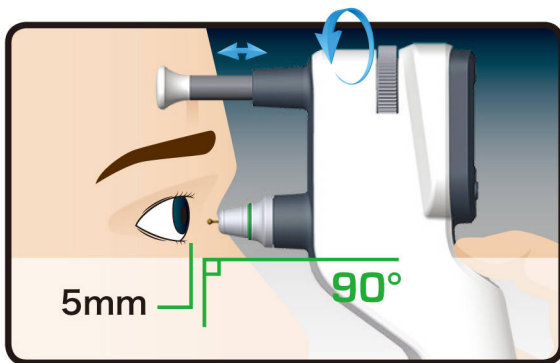

●仰臥位、立位または座位で測定できます。

5. 測定中はプローブが眼に接触します。測定ボタンを押し続け6回連続で測定を行うか、または測定ボタンを6回押して測定を行います。画面上の円の灰色の部分がつずつ青に変わります。



**ピッという電子音** —

各回の測定が完了したことを示します。


**ビピッという電子音** — —

測定エラーを示します。（取扱説明書のエラーメッセージをご覧ください）

**ピーッという長めの電子音** ———

6回の測定がすべて終了したことを示し、測定値がディスプレイに表示されます。

### 測定中のディスプレイ

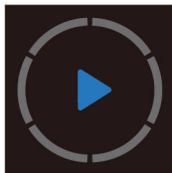

測定開始前



2回目の測定後



6回目の測定後



6回目の測定後  
偏差がやや高い場合




6回目の測定後  
偏差が高い場合

**電源の落とし方** セレクトボタンを3秒以上押すと、眼圧計の電源がオフになります。

## 各部名称

1. 額あて
2. プローブベース
3. カラー
4. ディスプレイ
5. 額あて調節ダイヤル
6. ナビゲーションボタン
7. セレクトボタン
8. 測定ボタン

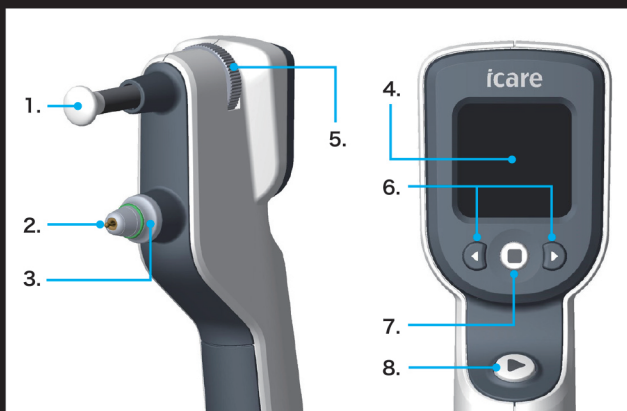

## プローブベースは定期的に交換してください。

### プローブベースの交換

1. 眼圧計の電源を切ります。
2. カラーを外し、安全な場所に置いてください。
3. プローブベースを眼圧計から丁寧に取り外します。
4. 眼圧計に新しいプローブベースを装填します。
5. カラーを締め、プローブベースを固定します。

