

エンドスコプアイは、 内視鏡※をiPhoneに 取付けるための 専用アダプターです。

iPhoneの機能を生かした診療補助システム
として利用できます。

※標準的な口径(32mm)を有する内視鏡が対象となります。
※iPhone、内視鏡、LED光源ハンドルは別売りです。



※iPhone SEイメージ画像



専用アプリ e-iPro



■露出調整 ■色温度調節 ■視野調整

使用する内視鏡毎に最適な撮影条件を設定できる専用のアプリです。使いやすい画像管理機能も備えています。

MEDIT 充電式LED光源ハンドル


MEDIT 充電式LED光源ハンドルとの組み合わせによりローコストで携帯可能な内視鏡システムの構築が可能です。詳しくは裏面をご覧ください。

【動画】セットアップ方法

<https://youtu.be/4zdLkeY225k>




3 STEPS セットアップは簡単です。

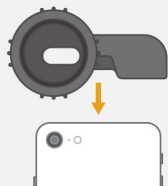


アダプター取付

アダプターをiPhoneにカチッと音がするまで押し込んでください。この状態でしっかりと固定されました。

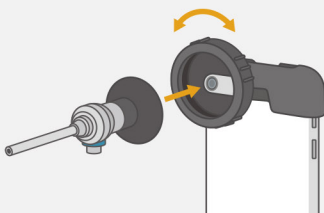

内視鏡取付

ロックリングを反時計回りにまわして緩めます。接眼部をリング内側に挿入し、ロックリングを時計回りにまわして固定します。

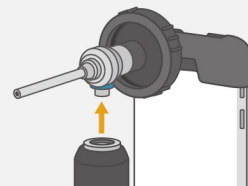

光源ハンドル取付

内視鏡にLEDハンドルを取り付けます。

エンドスコープアイ 内視鏡アダプター



ei-12~16



ei-11



ei-X



ei-7/8/SE

iPhone 14~16 シリーズ ￥45,000

例) iPhone 14の場合

ei-14	iPhone 14用
ei-14Plus	iPhone 14 Plus用
ei-14Pro	iPhone 14 Pro用
ei-14ProMax	iPhone 14 Pro Max用

※数字の部分は、シリーズ番号を当てはめてください。

iPhone 11 シリーズ ￥45,000

ei-11	iPhone 11用
ei-11Pro	iPhone 11 Pro用
ei-11ProMax	iPhone 11 Pro Max用

iPhone 7・8・SE シリーズ ￥32,000

ei-7/8/SE	iPhone 7・8・SE用
ei-7/8Plus	iPhone 7 Plus・8 Plus用

iPhone 12~13 シリーズ ￥45,000

例) iPhone 12の場合

ei-12	iPhone 12用
ei-12mini	iPhone 12 mini用
ei-12Pro	iPhone 12 Pro用
ei-12ProMax	iPhone 12 Pro Max用

※数字の部分は、シリーズ番号を当てはめてください。

iPhone X シリーズ ￥45,000

ei-X	iPhone X用
ei-XSMax	iPhone XSMax用
ei-XS	iPhone XS用
ei-XR	iPhone XR用

ご使用のiPhoneに対応する
製品をお選びください

- 1) iPhoneのホーム画面から「設定」をタップします。
- 2) 「一般」から「情報」を選択することで使用しているiPhoneの「機種名」を確認することができます。



内視鏡に取り付けて使用する
充電式の高輝度LED光源です。

■色温度：5,200K 自然な色を再現

■変換アダプター付



ACMI・町田製作所
OLYMPUS
ストライカーなど



Storz
ニスコ

SPK-100 充電式内視鏡用LED光源ハンドル ￥175,000

連続使用時間：最大光量で約45分	サイズ：W32×H103mm
充電時間：約2時間	重量：137g
充電電池：リチウムイオン充電電池	届出番号：13B2X00180000080



専用充電器

