

iCare IC100



Easy to use with minimal training

アイケア IC100手持眼圧計

TA011

For better perception **icare**

iCare IC100 tonometer

アイケア フィンランド社の特許技術


リバウンドテクノロジー

アイケア IC100は、リバウンドテクノロジーを用いた
"反跳式手持眼圧計"です。

極小のプローブを角膜に射出し、その跳ね返りの速度から眼圧を算出します。角膜への接触は一瞬で痛みも感じないため、麻酔薬は必要ありません。

操作方法と主な特徴

測定ボタンを押して眼圧を測定します。この操作を6回繰り返して正確な眼圧値を得ます。
測定ボタンの長押しにより6回連続の測定も可能です。

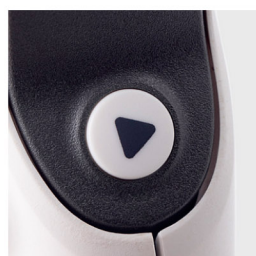


iCare
モードセレクト

単回と連続の測定モード
が選べます。



iCare
イージーナビ

保存データの確認などが
行えます。

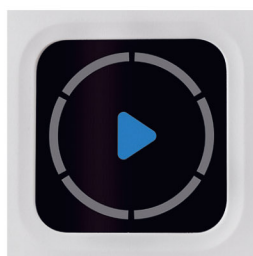

有機EL
ディスプレイ

操作ガイドや測定データ
を鮮明に表示します。



iCare
イージーポジショニング

正しい測定位置を赤と緑
のLEDで知らせます。



快適さを追求した機能



ディスポーザブルプローブは個包装されています。感染症や微生物汚染の心配はありません。



極小のプローブ(1.7mm)は優しく角膜に接触します。痛みはなく、麻酔薬は不要です。



測定はわずか数秒で完了します。正確で再現性の高いデータが得られます。



患者さんの状態に合わせて、単回と連続の測定モードが選べます。



車椅子や眼裂の狭い患者さん、乳幼児や小児、外来や往診など人と場所を選びません。

仕様

アイケア IC100手持眼圧計		890,000円(税別)
製品番号	TA011	
測定範囲	7～50mmHg	
データ保存	10件	
寸法	29mm(W)×95mm(H)×215mm(D)	
重量	約230g(電池込み)	
電源	単3アルカリ電池 4本	
電撃に対する保護の形式	内部電源機器	
電撃に対する保護の程度	BF形装着部をもつ機器	
医療機器承認番号	229ADBZX00030000	
製造業者	アイケア フィンランド社 (Icare Finland Oy)	

製品構成 : アイケア IC100手持眼圧計本体、
ディスポーザブルプローブ(100本入)、プローブベース、単3アルカリ電池 4本、
リストストラップ、シリコングリップカバー、操作ガイド、取扱説明書、
USBメモリストイック内取扱説明書、保証書、キャリングケース

消耗品 : **TA011-1** ディスポーザブルプローブ(100本入) 22,000円(税別)
TA011-6 ディスポーザブルプローブ(600本入) 114,000円(税別)
TA011-2 プローブベース 13,000円(税別)

オプション: **TA650** 卓上・壁掛けスタンド アイケアIC100用 28,000円(税別)
 アイケアIC100手持眼圧計専用のスタンドです。卓上・壁掛け、2通りのご使用ができます。
 130mm(W)×295mm(H)×卓上:160mm/壁掛け:115mm(D)



緑内障治療は新しい時代へ

iCareは眼科診療において信頼できるパートナーになることを目指しています。

これまで、眼に関する診断や治療に貢献するために、使いやすさと正確性に優れた革新的な医療機器をドクターへ提供してきました。

これからもより多くのドクターや患者さんが、眼科医療をもっと身近に感じられる

未来を目指して、確かな製品の開発に取り組んでいきます。



株式会社 エムイーテクニカ

本 社 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨 1-34-4
大 阪 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南 3-2-12
札 幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条 1-20-2
仙 台 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 1-9-2-203
名古屋 〒464-0858 名古屋市中種区千種 1-10-20 101
福 岡 〒812-0004 福岡市博多区榎田 1-8-28

TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866
TEL 06-6829-7912 FAX 06-6829-7922
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522
TEL 022-739-7975 FAX 022-739-7976
TEL 052-890-5565 FAX 052-890-5575
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

www.met Technica.co.jp

製品の仕様および価格は予告なく変更することがあります。

製造販売業許可番号：13B2X00180

202506-2-1500