



## ■ 操作ガイド


**icare**  
**ic100**

より詳しい情報については  
取扱説明書をご覧ください




## 眼圧計の電源を入れ、プローブを装填します

1. 測定ボタンを長押しし、眼圧計の電源を入れます。  
測定に際しては落下防止のためにリストストラップをご使用ください。

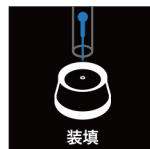

2. プローブ装填部のキャップを取り外し、  
プローブをセットしてください。

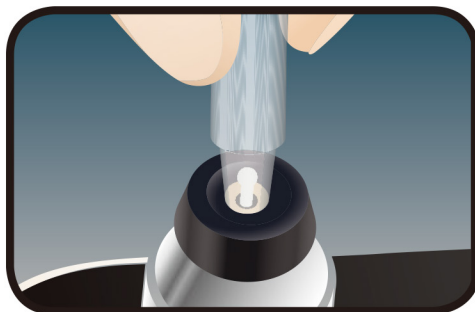


3. プローブを正しく装填するとディスプレイに  
右の測定開始マークが表示され、測定準備  
完了です。



## 測定

### ステップ 1.



患者さんに、リラックスして、まっすぐ前方の  
一点を見てもらいます。  
眼圧計を患者さんの眼に近づけます。

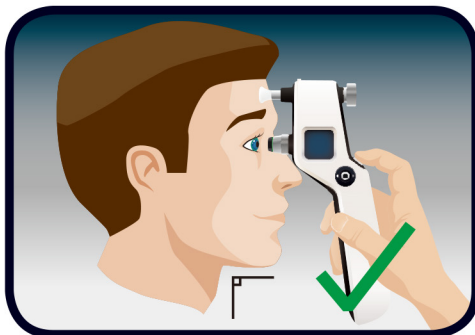

**ステップ2.**

プローブを水平に保ち、プローブが角膜の中心にまっすぐ向くようにします。プローブの先端から角膜表面までの距離が4～8mmになるように保持します。

プローブベースのインジケーターが緑色になっていることを確認してください。

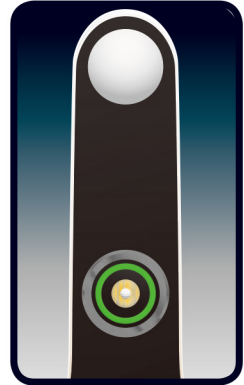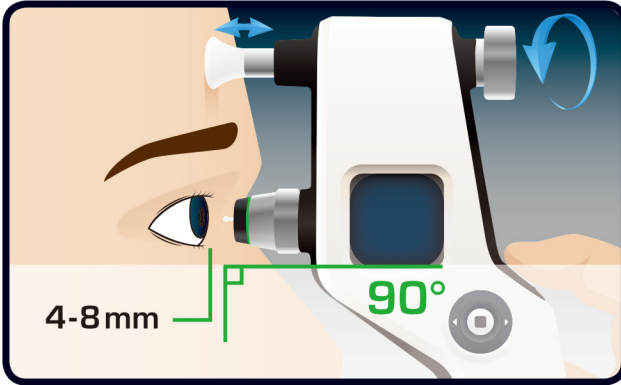

インジケーター（緑色）

**ステップ3.**

測定ボタンを押して、眼圧測定を開始します。

測定ボタンを押し続け、6回連続で測定を行うか、または測定ボタンを6回押して、測定を行います。測定の際にはプローブが優しく角膜に接触します。



**ビッという電子音1回** —

各回の測定が完了したことを示します。

**ビビッという電子音2回** — —

測定エラーを示します。（取扱説明書のエラーメッセージをご覧ください）

**ビーッという長めの電子音** ———

6回の測定がすべて終了したことを示し、測定値がディスプレイに表示されます。

**測定中のディスプレイ**

測定開始前



2回目の測定後



6回目の測定後




6回目の測定後  
偏差がやや高い場合



6回目の測定後  
偏差が高い場合

**電源の落とし方** セレクトボタンを3秒以上押すと、眼圧計の電源がオフになります。

## 各部名称

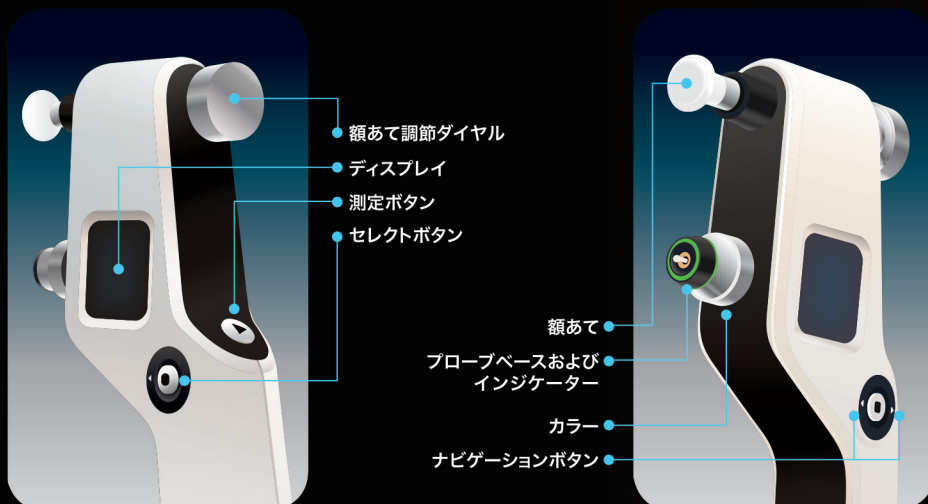

快適にご使用いただくために、プローブベースを定期的に洗浄/交換してください。

### プローブベースの洗浄

1. カラーを外し、プローブベースを眼圧計から取り外します。
2. 取り外したプローブベースを逆さにして、70～100%のイソプロピルアルコールを満たした洗浄容器に沈め、5～30分ほど浸漬させます。
3. エアードスター等を吹き付け、プローブベースを十分に乾燥させます。
4. 完全に乾いたプローブベースを元の位置に慎重に挿入しカラーを締めます。

プローブベースの洗浄は6ヶ月ごと、交換は12ヶ月ごとが目安です。  
プローブベースの洗浄/交換に関するさらに詳しい情報については  
取扱説明書をご覧ください。



 **M.E. Technica**  
株式会社 エムイーテクニカ

■ エムイーテクニカ お問い合わせフォーム  
<https://www.mettechnica.co.jp/contact>  
使用方法のご質問・お困りごとは、こちらからご連絡ください。