



イアーポッパーは、中耳の陰圧治療を行う耳管通気装置です。鼻腔より優しくコンスタントに空気を送り、中耳内の圧力を均等にします。

■ 各部の名称

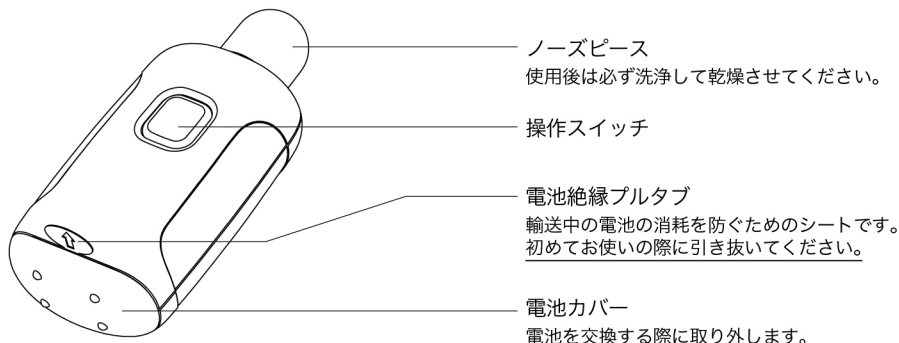

■ 使用方法

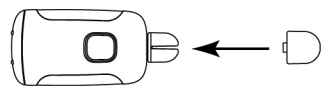

- ① 電池絶縁プルタブを引き抜きます。※最初の使用時のみ
- ② ノーズピースを本体に取付けます。
- ③ ノーズピースを鼻孔にしっかりと押し当てて、反対側の鼻孔を指で閉じます。
- ④ 本体のスイッチを押して鼻腔に空気を送り通気を開始します。
- ⑤ 2～3秒後に口を閉じて唾を飲み込みます。
※最初に少量の水を口に含んでおくと、飲み込みやすくなります。
- ⑥ 今度は反対の鼻孔にノーズピースを当てて、手順③～⑤を繰り返します。
- ⑦ 5分程おいてもう一度、手順③～⑥の操作を繰り返し行います。
これで1回の治療が終了します。

■ 電池の交換方法



- ① 本体裏側（操作スイッチの反対側）にある電池カバーの側面を親指で押すと電池カバーが外れます。
- ② 古い電池を取り出し、電池の向きに注意して新しい単4電池4本と交換します。
※電池の向きはシールの表示で確認できます。
- ③ 電池カバーを本体に取付けカチッと音がする位置まで押し込みます。
※電池の寿命は、連続使用で約4時間です。

■ メンテナンス

ノーズピースの洗浄と保管

- ・ノーズピースは、TPV樹脂を使用しています。滅菌はできません。
- ・使用後はノーズピースを本体より外し、中性洗剤等を用いて温水で洗浄した後、良くすすぎ乾燥させてください。ノーズピース内側の通気道にはスポンジが入っています。スポンジが濡れたままですと不潔になり、正常に動作しなくなる恐れがありますので完全に乾燥させてください。
- ・ノーズピースにキズや汚れがつかないように、清潔で乾燥した場所に保管してください。

本体のクリーニングと保管

- ・イアーポッパー外表面は、ABS樹脂を使用しています。本体を水に浸しての洗浄や滅菌はできません。必要に応じてアルコールを含ませた柔らかい布で拭いてください。
- ・6ヶ月以上使用しない場合は電池を外して保管してください。

■ 消耗品のご案内

M-EP1010-1 交換用ノーズピース 5個入 ￥3,000 (税別)

■ 仕様

付属品：ノーズピース 1個

材質：本体 ABS樹脂 滅菌不可
ノーズピース TPV樹脂 滅菌不可

寸法：53×113×32mm

重量：約125g (電池含む)

電源：単4アルカリ電池×4本

クラス分類：一般医療機器/クラスI

届出番号：13B2X00180000074

製造業者：サミットメディカル(米国)

【保証期間】 お買い上げ日より1年間

保証期間中に、正常なご使用状態において故障した場合には、無償で保証対応致します。
誤った使い方や事故などが原因の破損は保証外となります。

